

*Bibliothèque numérique*

**medic@**

**Leigh's. Catalogue intime dédié à la femme -- Leigh's**

*Paris : Leigh's, 1900 circa.*

*Cote : 199404*

199404 G 80



# Catalogue Intime

DÉDIÉ A LA FEMME



Il est une déesse  
Plus agile qu'Hébé, plus fraîche que Vénus :  
Elle écarte les maux, les langueurs, la faiblesse  
Sans elle la beauté n'est plus.

GRESSET (L'Hygiène).


**LEIGH'S**

FABRICANT - SPÉCIALISTE

20, Place des Vosges. PARIS-IV<sup>e</sup>



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

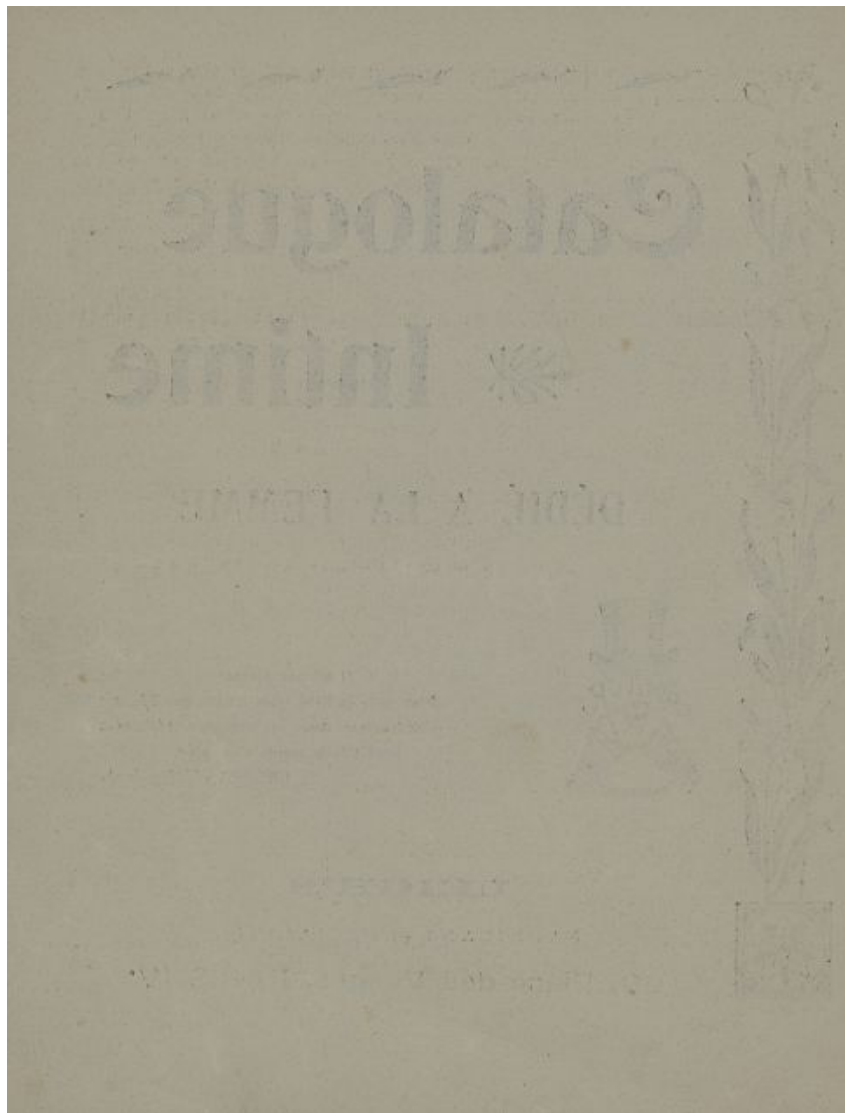

199404  
ANTISEPSIE • HYGIÈNE • TOILETTE • SÉCURITÉ


# L'HUMANUTÉRUS

BREVETÉ EN FRANCE, EN ALLEMAGNE  
EN ANGLETERRE ET DANS LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

## Procédé récent de préservation infaillible

Méthode du D<sup>r</sup> Kroning, approuvée par la Société  
d'hygiène et le corps médical

EXPOSITION D'HYGIÈNE ⌘ MÉDAILLE D'OR

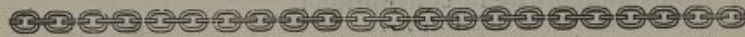

AVANT-PROPOS


## La Toilette Féminine

La toilette féminine est le titre — on ne peut le nier — d'un des plus importants chapitres de la Vie de la Femme, il comprend, en dehors des soins généraux du corps, de nombreux détails d'une puérilité, d'une complication et d'une gravité, qui forme un tout, inhérent à l'être même de notre si charmante compagne.

Ici, pour n'abuser de personne, nous nous contenterons d'effleurer seulement ce chapitre, et les femmes réellement délicates, intelligentes, observeront nos avis — sans plus de commentaires et d'avant-propos, — suivant leurs ressources et leurs besoins.

Elles comprendront toutefois, que dans le cadre si restreint de cette brochure, nous n'avons pu leur donner les quelques préceptes d'hygiène pouvant leur rendre de signalés services, et que nous avons été obligés d'en arriver brutalement aux faits que voici résumés :

Les médecins les plus ignorés, comme les spécialistes en renom et les matrones, ont toujours recommandé les injections antiseptiques journalières, froides ou chaudes, suivant le cas, et la patiente s'en est toujours bien trouvée.

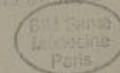

En effet, le vagin qui est recouvert de petits plis ou vient se loger un mucus filant et d'odeur particulière, doit être irrigué journellement, et pour bien faire il doit être en même temps, distendu, dilaté.

N'est-ce pas de ces soins que dépend la santé du vagin et de la matrice, ces organes si importants chez la femme, par l'influence directe qu'ils exercent sur son caractère et sa santé?

Or jusqu'à ce jour, il n'existait pas d'injecteur ou d'irrigateur capable de dilater le vagin, et de le nettoyer de la façon la plus complète et de le débarrasser, à l'instant, de toutes ses mucosités.

Frappés de cette lacune, nous avons cherché et trouvé un appareil répondant aux desiderata de nos nombreuses clientes, et nous pouvons affirmer maintenant que seul notre appareil l'**Humanutérus** peut leur rendre de réels services intimes.

Et les services intimes demandés par ces créatures si délicates sont multiples; la femme n'est-elle pas journellement exposée aux maux les plus divers?

Des risques et des dangers dont elle doit se garantir nous distinguons :

1° **Les dangers d'une toilette imparfaite;**

2° **Les dangers de la conception;**

3° **Les maladies des femmes.**

On ne saurait donc trop lui recommander d'user des moyens que l'hygiène et la science mettent à sa disposition pour la préserver de la maladie : ce bien cruel ennemi de la **Beauté**.

Puissions-nous faire réfléchir un instant toutes les femmes et nous attacher leur attention par ce court **avant-propos** : nous sommes persuadés que nous leur rendrons un grand service en leur faisant connaître l'**Humanutérus**.

Du moins, nous aurons augmenté leurs connaissances physiologiques, sans leur faire un cours de pathologie, sans blesser leur pudeur; et nous aurons guidé d'une main réellement sûre celles qui mettent leur bonheur dans leur santé.

Voyez du reste :

## I

### **Une merveilleuse découverte** **L'Injecteur Idéal, le seul au monde qui soit dilatateur**

Même pour faciliter la compréhension de nos explications, nous ne pourrions comparer notre injecteur-idéal-dilatateur à un injecteur quelconque et connu.



L'**Humanutérus** diffère entièrement de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui existe ; il est le **seul au monde qui soit dilata-teur**, et qui par conséquent distende les replis du vagin.

On sait — nous ne le répéterons jamais assez, — que le vagin est un canal membraneux aplati, presque fermé et qu'il est très difficile d'en faire la toilette d'une façon complète et réellement hygiénique.

Pas une femme ne peut soutenir qu'un injecteur à jets multiples, rotatifs ou autre, ait pu enlever à la perfection les sécrétions adhérentes à la muqueuse du vagin.

Nous pouvons donc affirmer, sans crainte d'être démenti, que l'**Humanutérus**, grâce à ses ailettes mobiles, est le **seul**, le **vrai**, l'**unique** injecteur **simple** et **efficace**, que la femme recherchait depuis longtemps.

Et ce n'est pas tout !

## Description Générale

L'**Humanutérus** est fabriqué en caoutchouc durci, de sorte que toute blessure est impossible, et le danger des impuretés d'instruments en métal entièrement évité.

L'**Humanutérus** se compose d'une canule ordinaire courbée et percée de plusieurs petits trous que protège une claire-voie mobile.

La fig. 1 représente l'appareil fermé prêt à être introduit, et la fig. 2 le montre ouvert tel qu'il doit être après l'introduction et pendant l'injection, ou l'*insufflation*, comme on le verra.



Fig. 1.

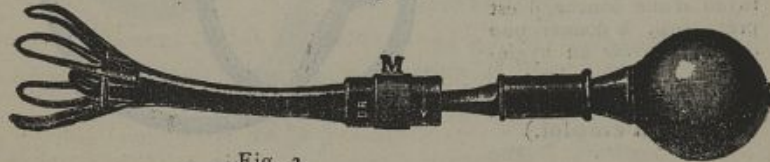


Fig. 2.



Cette canule se fixe au tuyau d'un irrigateur, d'un injecteur, d'un énéma; ou encore, s'adapte à une poire en caoutchouc, ce qui permet à l'**Humanutérus**, de rendre de multiples services intimes.

**Explication.** — La figure I représente l'appareil fermé prêt à être introduit et la figure II, le montre ouvert tel qu'il doit être pendant l'injection ou l'insufflation.

La lettre M représente la vis, qui commande les ailettes; la faire tourner dans le sens de la flèche pour faire ouvrir les ailettes; et, en sens contraire pour les refermer.

Les 2 figures ci-dessus représentent l'**Humanutérus**, auquel on a adapté la poire en caoutchouc pour donner une insufflation.

La fig. 3 représente l'**Humanutérus** relié au tuyau d'une douche, il est prêt, ainsi, à donner une injection utérine ou hygiénique.

(Voir le mode d'emploi.)

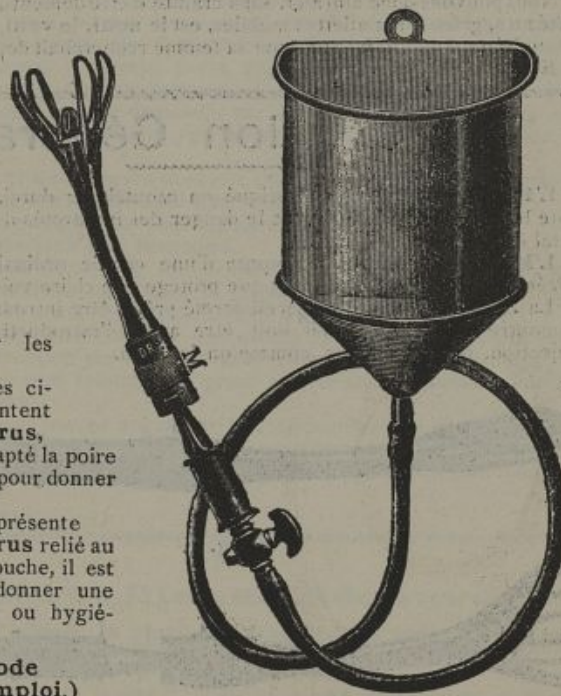


Fig. 3.

# Mode d'emploi

L'**Humanutérus**, — on l'a déjà deviné — est à la fois un appareil **hygiénique et préventif**.

C'est le seul instrument qui ait cette double propriété.

## INJECTION UTÉRINE

Pour prendre une injection utérine ou hygiénique, il suffit de relier la canule de l'**Humanutérus** au tuyau d'une douche, d'un *énéma* ou d'un irrigateur quelconque.

La femme introduit alors l'instrument avec sa partie courbe en haut dans le vagin, jusqu'à ce qu'elle rencontre de la résistance, à ce moment elle tourne la vis cannelée, représentée sur la gravure par la lettre M; les ailettes s'ouvrent et l'écartement s'opère pour faciliter l'action du jet sur **toutes les parties** du vagin. Les ailettes peuvent donner une dilatation de 65 millimètres.

Il est inutile — croyons-nous — de démontrer, même brièvement, **qu'une telle injection doit-être d'une efficacité surprenante.**

La fig. IV. représente la canule de l'**Humanutérus** adaptée à un *Alpha* ou *Enéma*.

Les ailettes sont ouvertes.

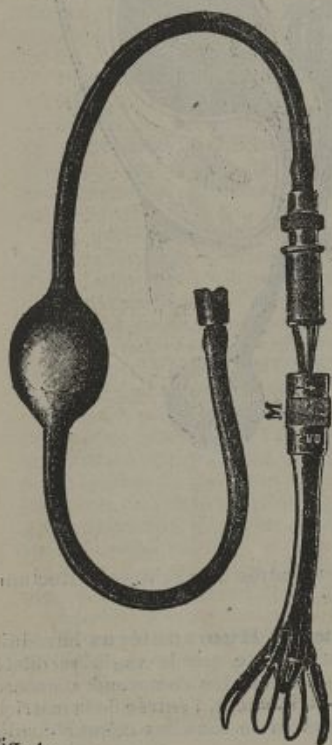


Fig. 4.



BIJOUX Santé  
Médecine  
Paris



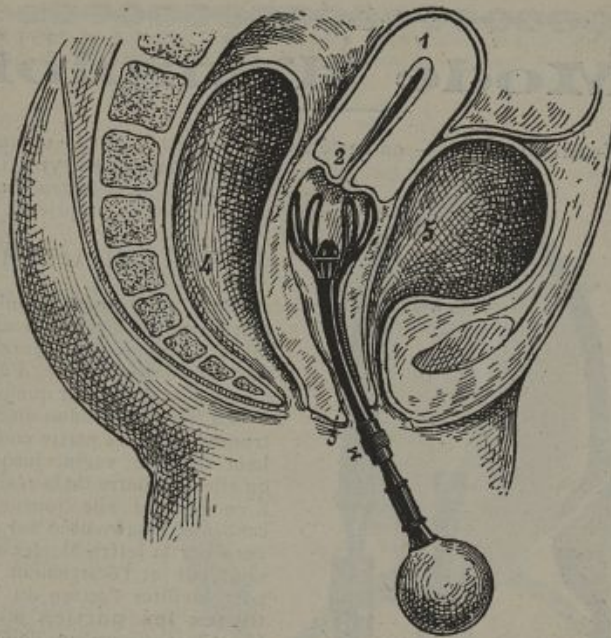


Fig. 5.

1. Matrice. — 2. Entrée de la matrice. — 3. Entrée du vagin. — 4. Rectum.  
5. Vessie.

**Explication.** — La figure 5 représente l'**Humanutérus** introduit dans le vagin. On se rendra facilement compte que le vagin se dilate réellement sous la douce pression des ailettes. On comprendra encore mieux que, si une *insufflation* était faite à ce moment, l'entrée de la matrice serait absolument protégée. Une injection prise dans les mêmes conditions sera réellement efficace.

## II PLUS DE PRÉSERVATIFS!

Plus de gêne, plus d'ennui, plus de surprise

Quoique semblant prématuré, ce faible cri vient de produire une émotion bien grosse, et intrigue fort le monde prévoyant.

*Plus de préservatifs!* mais on n'en peut croire ses yeux, et l'on doute encore de la véracité du fait, habitué que l'on est, des promesses alléchantes et... un peu trompeuses.

Et pourtant, la chose est vraie, exacte et réelle.

Plus encore, elle repose sur des données scientifiques.

En voici la preuve :

Frappé des multiples dangers qu'on laissait courir à la femme obligée de se **préserv**er d'une **conception**, pour une certaine durée ou pour toujours, un éminent spécialiste, après de longs travaux, trouva au commencement de cette année une poudre stérilisante qu'il fallait introduire dans le vagin.

La grosse difficulté était là, il fallait un appareil pouvant s'introduire dans les organes génitaux de la femme, sans les blesser, pour distribuer d'une façon parfaite la poudre stérilisante.

Cet appareil nous l'avons trouvé, et nous l'avons rendu parfait après de nombreux essais, tous concluants.

Nous, pouvons donc affirmer maintenant que notre **préservateur de la femme, l'HUMANUTÉRUS**, est l'appareil idéal, capable d'éviter la conception eu égard à la santé ou à la vie : tous les médecins l'attestent.

Aussi à présent que nous avons vaincu toutes les difficultés de la fabrication, que nous avons l'approbation du monde médical, nous nous permettons de venir offrir au public intelligent, un appareil répondant à toutes les exigences du médecin et de la femme, et qui peut être considéré à tous les points de vue, comme un appareil *parfait*, offrant une *sécurité* que nous **garantissons** totale, absolue, infaillible ; et dont l'**emploi** est simple, facile et pratique.

Nous ajouterons que l'**Humanutérus** est le seul appareil ayant été diplômé à la dernière Exposition d'hygiène.

Nos lectrices ne douteront pas un instant que l'*insufflation* et l'*injection utérine* sont deux moyens préventifs excellents, puissants : l'un parce qu'il intercepte toute communication avec la matrice et détruit les germes de la vie humaine ; l'autre parce qu'il expulse ces derniers, nettoie et assainit.

L'usage combiné des deux offrira une sécurité à la fois souveraine et peu coûteuse.



## INSUFFLATION VAGINALE

On ne prendra de préférence une insufflation vaginale ou préventive qu'après avoir séché l'appareil, s'il avait été humecté.

Afin de se donner cette insufflation, on introduira une cuillerée à café, environ, de poudre stérilisante dans la poire en caoutchouc que l'on adaptera ensuite à la canule de l'**Humanutérus**, comme nous l'avons expliqué.

Après s'être introduit l'appareil, et avoir dilaté les ailettes, la femme comprimera la poire plusieurs fois avec sa main droite et poussera ainsi la *poudre* dans le vagin.


Pour retirer l'appareil, elle vissera l'écrou en sens contraire, les ailettes se fermeront et l'appareil sera retiré.

L'introduction de la *poudre*, peut se faire une demi-heure avant les relations. Introduite avec soin, elle obstruera complètement l'entrée de la matrice, tout en restant dissimulée et ne gênant pas.

Et cela est si vrai que, si l'insufflation était faite à l'insu du mari, ce dernier ne pourrait ni s'en apercevoir, ni supposer la supercherie.

On n'en peut dire autant des *pessaires* et des *éponges* qu'on découvre immédiatement à la moindre exploration.

A la vue de l'appareil on comprendra mieux et plus facilement son mécanisme si simple, et le rôle qu'il est appelé à jouer dans le cabinet de toilette de toute femme soucieuse de conserver sa santé, sa beauté et sa vie.

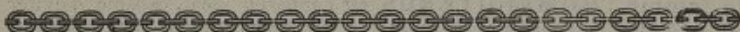

### III

## " L'HUMANUTÉRUS " ET LES MALADIES DES FEMMES

« Mieux vaut prévenir que guérir »

Avec l'**Humanutérus**, le médecin de femmes, pourra introduire des médicaments prophylactiques et guérissables, c'est donc un instrument médical de toute première nécessité.

Grâce à lui, la femme la moins sûre et la moins adroite pourra désormais s'introduire — elle-même, — des médicaments, soit liquide, soit en poudre, que seulement jadis, la main exercée du praticien, aidé du spéculum pouvait introduire.

L'effet des poudres stérilisantes est infailible, lorsqu'on a pu dilater toutes les parties molles du vagin et saupoudrer toutes ces parties et le col utérin, ce qu'on arrive à faire à la perfection avec l'**Humanutérus**.



L'emploi de l'**Humanutérus**, dans les cas de pertes blanches ou *leucorrhée* est tout indiqué. Son emploi s'impose pour guérir radicalement et en peu de temps, les *mitrites*, *vaginites*, *ulcérations du col*, *tumeurs*, et toutes les maladies caractérisées par un écoulement plus ou moins purulent, et qui viennent frapper si douloureusement la femme. Toutes les élégantes savent que ces affections amoindrissent, sans pitié, et l'éclat des yeux et les autres grâces, y compris le teint et la voix.

Mais, nous ne saurions trop recommander à nos lectrices de se préserver de toutes ces affections dont l'origine de l'infection est due à une toilette imparfaite. « **Mieux vaut prévenir que guérir** ».

Toutes les dames prévoyantes et soucieuses de leurs charmes et de leur santé, voudront donc posséder, dans leur intérêt, un appareil aussi parfait, à tous les points de vue.

### **Poudre antiseptique, germicide, inoffensive**

La poudre **Humanutérus** est indispensable pour prévenir la conception, nous la garantissons germicide, antiseptique, désodorante dépurative et inoffensive.

Elle possède toutes les conditions voulues d'innocuité.

Nous engageons, toutes nos clientes, à nous confier le soin de leur faire adresser cette poudre. Elles n'auront qu'à se louer de notre intermédiaire, et s'éviteront, ainsi, bien des surprises.

La boîte contenant 25 doses. . . . . **4 fr. 50**



#### IV

### **Conclusion**

L'**Humanutérus**, par le court exposé qu'on a vu, est l'injecteur-dilatateur parfait, inventé suivant les désirs des plus réputés médecins de femme, et construit sur les indications de ces derniers.

Il est le seul injecteur vaginal offert au commerce, dont tous les spécialistes ont osé en recommander l'acquisition. Nous donnons du reste plus loin quelques attestations extraites entre mille autres.

Il n'est donc pas douteux que l'**Humanutérus** remplacera sous peu, **tous les injecteurs connus**.

La femme appréciera l'avantage incontestable qu'il a de servir,





lorsqu'on le désire, d'appareil préventif, en évitant l'emploi suranné des éponges, des pessaires, etc.

L'**Humanutérus** est donc bien l'appareil **parfait, hygiénique préventif, économique et bon marché**, que la femme devra demander et dont elle ne pourra plus se passer.



V

## P R I X

L'**Humanutérus** est entièrement fabriqué avec des produits de toute première qualité, nous le garantissons **inusable**.

Son achat qui ne constitue qu'une dépense unique, sera largement compensé en peu de temps par les dépenses et les ennuis qu'il évitera.

Nous faisons ressortir ici qu'il remplace les plus parfaits instruments indispensables à la femme pour sa toilette intime.

Nous n'en vanterons pas davantage les nombreuses qualités qu'il possède et qu'on a pu apprécier par tout ce qui précède.

L'appareil complet comprenant :

1° L'**Humanutérus** ;

2° La poire en caoutchouc pour l'*insufflation* ;

3° Un robinet et une autre pièce conique, pour le relier au tuyau d'un injecteur ou autre appareil ;

4° Un flacon de *poudre germicide* d'une contenance de 25 doses.

Est adressé, franco, discrètement et recommandé par la poste, contre mandat, bons ou chèque de


**30 francs**

Nous adressons également, sur demande, l'**HUMANUTÉRUS**, complet, **mais sans poire, ni poudre**, contre la somme de :

**25 francs.**

NOTA. — Les expéditions contre remboursement ne sont faites qu'après réception des frais occasionnés par ce mode d'envoi et s'élevant à 1 fr. 25 cent. pour la France.

La poste ne se chargeant pas des contre-remboursements pour l'Etranger, nous prions nos clients de l'Etranger de nous adresser préalablement le montant, en chèque ou en mandat-international.

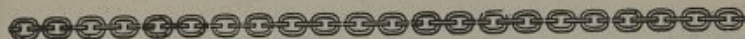

## VI

## ATTESTATIONS

Nous extrayons, des centaines de lettres émanant de médecins de tous les pays, les quelques attestations qui suivent, et qui pourront convaincre la lectrice restée encore indécise.

L'Injecteur-dilatateur combiné avec un irrigateur de E. Kroning a été employé par moi depuis juillet, et je le tiens pour l'instrument le plus pratique pour la dilatation du vagin, ou le dégagement du col de la matrice, auquel s'ajoute le saupoudrage de poudres médicinales ou le lavage par des liquides.

Le maniement est aussi facile pour la femme que pour le médecin, malgré la complication apparente de l'instrument.

Berlin, le 10 novembre.

Signé D<sup>r</sup> Borkhard.

Il y a un an, mon attention fut appelée sur votre Injecteur-dilatateur. Les avantages de cet appareil furent tellement convaincants pour moi que je l'ai recommandé à mes clientes, chaque fois que le cas s'est présenté, et ceci avec le plus grand succès.

Je ne crois pas exagérer si j'affirme que l'appareil dans sa forme maniable peut-être regardé comme l'idéal d'un Injecteur-Dilatateur.

Paris, le 18 septembre.

Signé D<sup>r</sup> S..., médecin praticien.

Par ces présentes je vous confirme volontiers que j'ai employé votre Injecteur-dilatateur depuis un an et pendant tout ce temps, il a répondu entièrement à son but.

New-York, le 18 septembre.


Signé D<sup>r</sup> Franck.

Les multiples essais auxquels je me suis livré m'ont donné la certitude, m'ont prouvé que votre appareil l'**Humanutérus** est idéalement parfait.

Il n'est pas une de mes clientes à qui je ne l'ai chaudement recommandé.

Paris, le 8 novembre.


Signé : D<sup>r</sup> Dupuytrem.

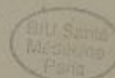

Depuis que j'emploie et que je recommande votre **Humanutérus** ma clinique est constamment envahie par des dames de toutes les classes venant, de tous les points de la ville, me demander votre appareil.

Je vous prie de m'adresser encore une centaine de vos brochures.  
Lyon, le 20 octobre.

Signé : Dr M....

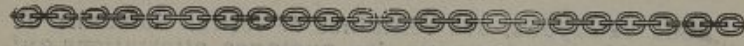

## QUESTIONNAIRE

### à l'usage des personnes désirant se munir d'un HUMANUTÉRUS

Afin d'éviter une perte de temps pouvant être préjudiciable à la santé de nos clientes, et nous basant sur les milliers de lettres qui nous sont déjà parvenues, nous avons dressé le **questionnaire** qui suit, accompagné des réponses que nous avons données à nos correspondantes.

*Quels sont tous les services que peut rendre l'Humanutérus ?*

L'emploi de l'Humanutérus est tout indiqué, et les résultats sont surprenants :

1° Pour la toilette intime.

2° Pour éviter la conception, s'il y a lieu.

3° Pour guérir les pertes blanches et les autres écoulements.

On ne saurait demander plus de service aussi importants à un appareil, serait-il plus compliqué et plus cher.

*Mais, assurez-vous que votre appareil évite certainement la conception ?*


*Existe-t-il encore des risques, des dangers imprévus ?*

*Si non, la vue de votre appareil en trahit-elle son usage ; est-il un de ces instruments indiscrets ?*

Nous n'avons jamais été aussi affirmatifs. Mais depuis que nous avons un appareil projetant une poudre antiseptique, germicide, à l'entrée de la matrice, c'est-à-dire à l'endroit où passent les spermatozoïdes pour venir féconder l'ovule, nous pouvons dire avec certitude, que la **conception est désormais impossible**, l'opération reposant sur l'évidence de faits anatomiques et physiologiques.


Et, ni la poudre antiseptique, ni les ailettes de l'**Humanutérus** ne peuvent provoquer d'accidents ou d'inflammation — nous le garantissons.

Quant à l'appareil, on n'aurait su lui donner une forme plus discrète. Il ressemble par sa forme à toutes les canules ordinaires, et, seule, l'initiée peut en connaître l'usage.

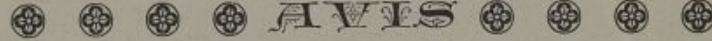

## AVIS

Nous nous ferons un plaisir de répondre, par retour du courrier, aux autres demandes de renseignement qu'on pourrait nous faire encore.

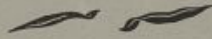

Nous rappelons qu'un docteur attaché à notre maison, adressera ses conseils aux personnes qui lui exposeront leur cas.





